


ケアコム社製ナースコールシステムへの センサーマットの接続方法

下記のケアコム社製ナースコールシステムをお使いの場合、お客様の環境によって
ご用意いただく付属品が異なります。

《 ナースコール品番 》

- ・RB-826WZ ・BA-602WZ
- ・RB-300WZ ・BA-611WZ
- ・BA-601WZ ・BA-612WZ

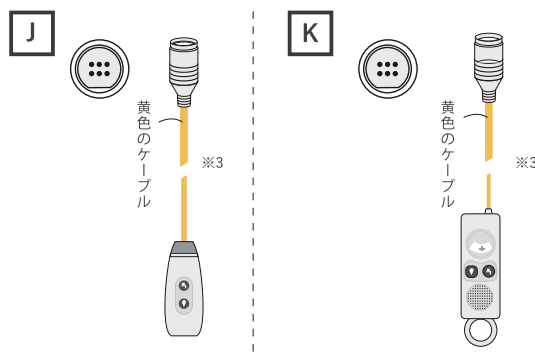

Q

壁面にケアコム社製オプションの
コンセントが内蔵されている。



Yes

No

付属の
接続アダプタを使用して
壁面のコンセントに
接続してください。

Q

ケアコム社製の
分配コンセントを持っている。

BB-301WZ-2P / W6P-NC /
BB-301WZ-2P / W6P-OP1 等



Yes

No

分配コンセントのセンサーの
コンセントに付属の接続アダプタを
使用して接続してください。



分配コンセントを別途ご購入
いただく必要がございます。

詳しくは株式会社Magic Shields
もしくは販売代理店までご連絡ください。