

アイホン社製ナースコールシステムへの センサーマットの接続方法

下記アイホン社製ナースコールシステムをお使いの場合、お客様の環境によって
ご用意いただく付属品が異なります。

《 ナースコール品番 》

- ・NL-SB
- ・NLR-8
- ・NLR-8-TT

N



Q

壁面に、アイホン社製オプションの
センサー接続用のコンセントが内蔵されている。



Yes

付属の接続アダプタを使用して
壁面のコンセントに
接続してください。

対応接続アダプタ：
A3-2NLR



No

Q

アイホン社製の
分配コンセントを持っている。

アイホン品番：NLR-CA-OPA



Yes

分配コンセントのセンサーの
コンセントに付属の接続アダプタを
使用して接続してください。

アイホン品番：CB-3



No

分配コンセントを別途ご購入
いただく必要がございます。

詳しくは株式会社Magic Shields
もしくは販売代理店までご連絡ください。