

ナースコール参照図

メーカー名	ケアコム							
壁側の ソケット形状 (通し記号)	A	B	C	D	E	F	G	H
ナースコール スイッチの 形 状								
メーカー型番	—	—	RB-822 RB-822-C RB-822-A	—	RB-823 RB-823-C	BA-501 BA-501-C BA-511 BA-511-C	BA-501Z BA-501Z-C BA-511Z BA-511Z-C BA-511Z-A	RB-830Z
特記事項	—	—	—	—	—	アナログタイプ *1ラベルがクリーム色 または茶色	デジタルタイプ *2ラベルがシルバーで "Z"が記載されています	—
ナースコール接続アダプタ情報								
カタログ番号	要改造		A2-1	要改造		A3-1	A4-1C	A4-1Z
形状	要改造			要改造				

メーカー名	アイホン						
壁側の ソケット形状 (通し記号)	A	B	C	E	F	G	
ナースコール スイッチの 形 状							
メーカー型番	NBR-8A-C	—	NB-RC/A NC-RC	NE-RC/A	UB-SB8 UB-SB8S	UBR-8-TT	UB-SB8-TT
特記事項	—	—	内蓋に記載があります。 		—	—	—
ナースコール接続アダプタ情報							
カタログ番号	A2-1	要改造	A4-1NC・A4-1NE	要改造	要改造	要改造	要改造
形状							

メーカー名		ケアコム		
壁側の ソケット形状 (通し記号)	I	J	K	
ナースコール スイッチの 形状				
ナースコール メーカー型番	BA-502Z BA-512Z	RB-826WZ RB-830WZ	BA-601WZ BA-602WZ BA-611WZ BA-612WZ	
特記事項	—	別途《分配コンセント》を ご用意いただく場合があります。 P4の接続方法をご参照ください。		
ナースコール接続アダプタ情報				
カタログ番号	A6-1Z	CA-2	CA-2	
形状				

ケアコム (パナソニック)			
L	M	N	O
—	VH-804M	VH-571 VHR-560	VH-5085R1
—	—	—	—
ナースコール接続アダプタ情報			
要改造	要改造	要改造	要改造

メーカー名	アイホン			
壁側の ソケット形状 (通し記号)	H	J	L	N
ナースコール スイッチの 形 状				
メーカー型番	NFR-C-OP NFR-CA-OP	NFR-8 NFR-8A	NF-SB NF-SBA	NL-SB NLR-8 NLR-8-TT
特記事項	—	—	—	アイホン社製の 分配コンセントで 接続する場合 アイホン社製の オプションのコンセントが 壁面に内蔵されている場合
ナースコール接続アダプタ情報				
カタログ番号	A3-2NFX	B5-1NFX	B5-1NFX	CB-3
形状				

ご 注 意 点

- ※ 要改造の場合は、お使いのナースコール子機を一度お送りいただく必要がございます。
- ※ デモ体験の際、ナースコールと繋がらない専用受信機アラートタイプのご案内となります。

※3 ケアコム社製WZ子機(旧Wellシリーズ)の場合は、別途ケアコム社製「分配コンセント」が必要です。
ケアコム社製分配コンセント ● 名称:分配コンセント(2P、W6P、一般) 型式:BB-301WZ-2P / W6P-NC ● 名称:分配コンセント(2P、W6P、特定1) 型式:BB-301WZ-2P / W6P-OP1

分配コンセントが必要な場合の接続方法

《 対象：ケアコムJ・K / アイホンN 》

ケアコム社製ナースコールシステム J・K の場合

右記のケアコム社製ナースコールシステムをお使いの場合、お客様の環境によってご用意いただく付属品が異なります。

ナースコール品番 (ケアコム:J・K)

・RB-826WZ ・RB-300WZ ・BA-601WZ
・BA-602WZ ・BA-611WZ ・BA-612WZ

Q

壁面にケアコム社製オプションのコンセント※が内蔵されている。



Yes

付属の接続アダプタを使用し、壁面のコンセントに接続してください。

No

Q

ケアコム社製の分配コンセントを持っている。
BB-301WZ-2P / W6P-NC / BB-301WZ-2P / W6P-OP1



Yes

分配コンセントのセンサーのコンセントに付属の接続アダプタを使用して接続してください。



No

分配コンセントを別途ご購入いただく必要がございます。
株式会社 Magic Shields・販売代理店までご連絡ください。

アイホン社製ナースコールシステム N の場合

右記のアイホン社製ナースコールシステムをお使いの場合、お客様の環境によってご用意いただく付属品が異なります。

ナースコール品番 (アイホン:N)

・NL-SB ・NLR-8 ・NLR-8-TT

Q

壁面にアイホン社製オプションのコンセント※が内蔵されている。



Yes

付属の接続アダプタを使用し、壁面のコンセントに接続してください。
対応接続アダプタ: A3-2NLR



No

Q

アイホン社製の分配コンセントを持っている。



Yes

分配コンセントのセンサーのコンセントに付属の接続アダプタを使用して接続してください。
アイホン品番: CB-3



No

分配コンセントを別途ご購入いただく必要がございます。
株式会社 Magic Shields・販売代理店までご連絡ください。

株式会社 マジックシールズ

〒430-0933 静岡県浜松市中央区鍛冶町100-1 ザザシティ浜松中央館 B1F・FUSE

☎ 050-1742-4700 (平日 10:00 - 17:00)

ころやわの詳細情報はここから→

ころやわ センサーマット

「ころやわ」は株式会社マジックシールズの登録商標です。

<https://www.magicshields.co.jp>



2024.12.13

Magic Shields


デモ機無償貸出し体験の流れ

《 ころやわマットセンサー 》

ナースコール形状を確認してください

1 ナースコールメーカーを調べる。

- 病院や施設で導入されているナースコールメーカーを調べてください。

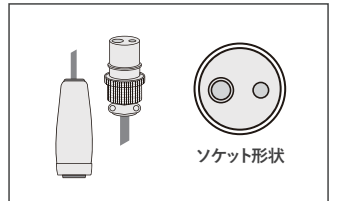

2 ナースコールスイッチを取り外し、壁側のソケット形状を確認する。

- 実際にご利用いただくお部屋のナースコールスイッチを取り外し、壁側のソケット形状を確認してください。



3 ナースコール参照図 (P2・3) から該当する形状を特定する。

- ソケット形状とナースコール参照図を照らし合わせ、ナースコール形状を特定してください。
- ナースコールの子機型番からでもナースコール形状を特定できます。



4 製品ページ内申し込みフォームにて必要項目をご入力ください。

※無償貸出しはフォームからのみ受け付けております。



ナースコールとの接続方法

ナースコールへの接続イメージは下図の通りです。センサーの増設や、コードの延長をお希望の場合はお気軽にご連絡ください。

接続方法動画は製品ページ(上記QR)からご確認ください。

<https://www.magicshields.co.jp/products/sensor/>

無線タイプ

※基本的な接続方法を記載しております

ご準備いただくもの

ナースコール端子
ご使用の
ナースコールスイッチ



お届けするもの



ACアダプタ

受信機

ナースコール
接続アダプタ

センサーマット
(送信機内蔵)



有線タイプ

ご準備いただくもの

ナースコール端子
ご使用の
ナースコールスイッチ



お届けするもの



接続コードスイッチ

ナースコール接続アダプタ

センサーマット



2025.07.24